

**БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА**  
**ЗА ПОВИКВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ ЗА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ**

**Компоненти:**

1. Табло-приемник за повиквания от до 16 броя стаи/легла – 1бр.
2. Безжичен Бутон за повикване (с поставени батерии Li-Ion CR2016 3V -2бр) – таблото приемник поддържа до 16 броя безжични бутони
3. Адаптер 220V/12V посредством който се захранва Таблото-приемник – 1бр.

**Обща информация:**

Предназначена е за малки здравни заведения (отделения в болници, старчески домове и т.н.) с малък брой стаи, при които не е необходимо да се пази информация кога е постъпило повикване и кога персоналът се е отзовал. Системата поддържа до 16 безжични Бутона за повикване. Те могат да бъдат неподвижно закрепени (към стена, нощно шкафче) или да бъдат оставени подвижни. Възможни са два начина на разполагането им:

- по един бутон в стая: тогава системата ще обслужва до 16 стаи и на таблото-приемник ще се изписва номерът на стаята
- по един бутон за легло: тогава системата ще обслужва до 16 легла и на таблото-приемник ще се изписва номерът на леглото, от което е дошло повикването

Предимства:

- ниска цена
- не е необходимо никакво окабеляване
- не е необходим компютър
- лесно и просто боравене

Недостатъци:

- сравнително малък брой стаи/легла
- ограничения в обхвата: той е около 50м отстояние от Таблото-приемник при пряка видимост, но са възможни вариации в зависимост от типа застрояване.
- не се съхранява информация за настъпилите събития

**Принцип на действие:**

На подходящо място в заведението (например в стаята на сестрите) се поставя Таблото-приемник. В горния край на лицевия панел са разположени светодиоди с номерата на стаите/леглата, а в долния край на таблото за всяка стая/легло има бутонче със същия номер.

Когато някой натисне Бутон за повикване, светва светодиода на съответната стая/легло и зазвучава тих звуков сигнал.

Ако служителят натисне бутончето за реакция със същия номер, светлинната и звукова сигнализация спират.

Ако не бъде натиснато бутончето за реакция в рамките на една минута, звуковият сигнал става по-интензивен. Звукът спира или след натискане на бутончето или се преустановява сам след още около минута.

**Гаранционен срок: 2 години**

Гаранционни условия:

Гаранционното обслужване се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, проявени по време на гаранционния срок - 2 години и не се отнася до батериите. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Датата се удостоверява с копие на фактурата и наличен стикер със серийния номер (всеки бутон и всяко табло имат залепен от вътрешната страна на пластмасовата кутия стикер).

При липсваща фактура, за дата на закупуване се счита датата на производство, закодирана в серийния номер.

Ремонът и монтажът се извършват САМО ОТ ОТОРИЗИРАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛИСТИ.

Гаранцията не се отнася до повреди:

- причинени от неправилна употреба и/или лоша поддръжка
- настъпили при транспортиране
- настъпили вследствие на природни бедствия, токови удари, работа в агресивна околна среда (влага, прах, химикали, течности и др.)

В тези случаи ремонтът се извършва срещу заплащане.

Производител: ЕТА СИС ООД гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“60

тел./факс : 052/65-11-44; 052/65-11-10

моб.: 0878/847002

e-mail: [eta-sys@goonet.org](mailto:eta-sys@goonet.org)

web: <http://eta-sys.goonet.org>

## Технически данни

Брой радио-зони (брой стаи/легла)	До 16
Брой ДУ (брой Бутони за повикване)	До 16
Захранващо напрежение (адаптер 12V/400mA)	= 12 V
Консумация	Макс. 300 mA

## Програмиране на Бутон за повикване

**1. Натискате бутончето на левия страничен панел (най-големия отвор) на таблото-приемник толкова пъти, колкото е номера на стаята/леглото, за която ще програмирате Бутон за повикване.**

*Индикации:*

В режим програмиране червеният светодиод PRG на лицевия панел свети.

В горния край на таблото-приемник светват последователно номерата на стаите/леглата в зависимост от това колко пъти е натиснато бутончето.

Когато стигнете до желаната стая/легло (номерът ѝ да свети), преминете към т.2

**2. Натиснете за 2-3 секунди бутончето на Бутона за повикване, който ще поставите на избрания номер стая/легло**

*Индикации:*

Свети светодиодът на Бутона за повикване (докато е натиснат)

Свети червеният светодиод до бутончето за програмиране

Светва за кратко по-ярко светодиода на избраната стая/легло

**Бутонът за повикване е програмиран (присъединен към съответната стая/легло)**

*Индикациите за това са:*

Угасва светодиодът на избраната стая/легло

Угасва светодиода PRG

Ако искате да продължите да 'присъединявате' бутони, се върнете към т.1

## Изтриване на Бутони за повикване

Изтриват се едновременно всички Бутони за повикване, след което трябва да се програмират тези, с които ще се работи.

**1. Натискате продължително бутончето на левия страничен панел (най-големия отвор) на таблото-приемник**

*Индикации:*

Червеният светодиод PRG на лицевия панел светва.

Държете натиснато докато червеният светодиод угасне

Системата остава в режим "Програмиране на Бутони" следващите десетина секунди (свети стая/легло 1)